


Gefeliciteerd met uw aankoop van de aluminium zeep en desinfectiedispenser!

Om het gebruiksplezier te verhogen hierbij een aantal tips.

- ✓ Zorg voor een goed gevulde flacon met vloeibare alcohol of alcohol gel;
- ✓ Bij het opstarten minimaal 5 x pompen;
- ✓ Indien gewenst kan de sproeikop losgedraaid worden;
- ✓ Let op! Handle with care. Handel niet volledig doordrukken;
- ✓ Last van een haperende of lamme handel? Lees onderstaande instructies.

Handle with care!

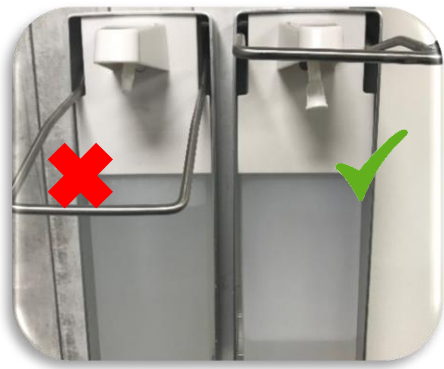

Let op! De handel niet volledig doordrukken, een klein stukje omlaag duwen totdat de handel tegen drukt is voldoende. Zie foto.

Haperende (lamme) dispenser

Het kan zijn dat de dispenser onverwacht niet meer terugveert, dan voel je bij het naar beneden duwen van de hendel ook geen weerstand meer.

Als de dispenser van de houder gehaald wordt, zal aan de achterkant het volgende zichtbaar zijn:



Duidelijk zal zijn dat het schroefdraad verder naar binnen is gedrukt, dit kan verholpen worden door aan de brede ring te draaien en dan zal de kop weer losschieten.

Het moet er uitzien zoals op de volgende foto de kop moet tegen het metalen stangetje drukken:

